

iNFRADiS



NOTICE D'UTILISATION

- Il est conseillé de porter ce masque lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles de votre foyer.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.



Avant de le mettre:

Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

Pour le mettre:

- 1-Tenez le masque par les lanières élastiques.
- 2-Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- 3-Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.



Il faut changer le masque:

- 1-Quand vous avez porté le masque 4h.
- 2-Quand vous souhaitez boire ou manger.
- 3-Quand il devient difficile de respirer.
- 4-Si le masque s'humidifie.
- 5-Si le masque est endommagé.
- 6-Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

- 1-Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
- 2-Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
- 3-Jetez-le masque tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
- 4-Pour terminer: lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

- > 3 couches
- > 3 plis
- > Barrette serre-nez incorporée
- > Dimensions 175 x 95 mm
- > Taux de filtration bactérie >95%
- > Efficacité de filtration (réelle) 99.6 %

Masques de protection jetable - boîte de 50 pcs
RÉFÉRENCE : 1219
EN 149:2001+A1:2009 / GB/T 32610-2016



4h max